

Kit de prélèvement vaginal BD Molecular : Procédure d'auto-prélèvement patient





Pour le personnel médical

- N'utilisez pas de lubrifiant avec le kit de prélèvement BD Molecular Swab pour faciliter l'autoprélèvement.
- La patiente doit recueillir son échantillon avant tout examen vaginal effectué avec un lubrifiant.
- Les écouvillons vaginaux auto-collectés sont des types d'échantillons approuvés pour le BD CTGCTV2 pour le système BD MAX™ et le panel vaginal BD MAX™.

Instructions patient pour l'auto-prélèvement

Veuillez lire toutes les instructions avant de prélever les échantillons. Si vous avez des questions sur cette procédure, veuillez les poser à votre médecin ou à votre infirmière.

- Se laver les mains avec de l'eau et du savon. Les rincer et les sécher.
1. Retirer l'écouvillon stérile de sa gaine, en évitant de contaminer l'embout ou la tige. Ne pas poser l'écouvillon sur une surface. Si l'embout de l'écouvillon est touché, si l'écouvillon tombe ou est posé, le supprimer et demander un nouveau BD Molecular Collection Swab. Vérifier la présence de l'embout d'écouvillon. Si l'écouvillon est dépourvu d'embout, le jeter et demander un nouveau BD Molecular Collection Swab.
 2. Tenir l'écouvillon par son capuchon d'une main de sorte à orienter l'embout de l'écouvillon vers soi (Image 2). De l'autre main, écarter doucement les lèvres du vagin. Introduire l'embout de l'écouvillon dans l'ouverture vaginale (Image 2). Pointer l'embout vers le bas du dos et relâcher les muscles.
 3. Faire glisser doucement l'écouvillon dans le vagin sur 5 cm (2 pouces) au plus (Image 3). Si l'écouvillon ne glisse pas facilement, le faire tourner doucement en l'enfonçant. Si cela reste difficile, n'essayez pas de poursuivre l'auto-collecte ; consultez un professionnel de santé.
 4. Faire tourner l'écouvillon pendant 10 à 15 secondes (Image 4).
 5. Ressortir l'écouvillon sans toucher la peau à l'extérieur du vagin. Replacer l'écouvillon dans sa gaine et bien refermer avec le bouchon (Image 5).
- Après le prélèvement, se laver les mains avec de l'eau et du savon, les rincer et les sécher. Remettre l'écouvillon dans sa gaine à l'infirmière ou au médecin.

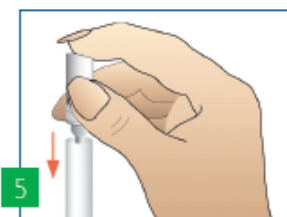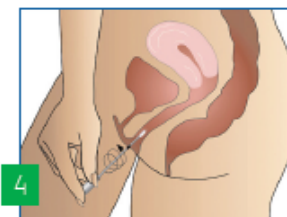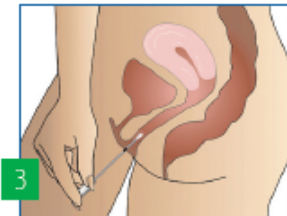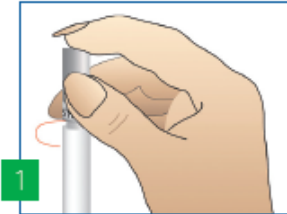

Le BD MAX™ System, le BD Vaginal Panel et le BD Molecular Swab Collection Kit sont des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro portant le marquage CE. Les BD CTGCTV2 et BD CTGCT2 pour le système BD MAX™ sont des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro portant la marque CE et sont certifiés CE par BSL Group The Netherlands B.V. (Numéro d'organisme notifié = 27 97)

BD - 11 rue Aristide Bergès - ZI des Îles - BP4 - 38801 Le Pont de Claix Cedex

bd.com/fr

CE 2797 CE



BD et le logo BD sont des marques commerciales de Becton, Dickinson and Company ou de ses filiales © 2021 BD. Tous droits réservés. AB-Com. Becton Dickinson France S.A.S. au capital de 63 356 160 €. RCS Grenoble B 056 501 711. Siret 056 501 711 00115.